



5 STEPS VON DER KONDITIONIERUNG ZUM POLIEREN



1. ZÄHNE KONDITIONIEREN

Die Zähne trocken legen und anätzen.




2. ÜBERTRAGUNGSFOLIEN BEFÜLLEN

Die Übertragungsfolie mit **vorgefülltem Kunststoff** entnehmen und zusätzlichen Kunststoff einfüllen.



3. EINSETZEN

Einsetzen und andrücken der Übertragungsfolie. Darauf achten, dass sich so wenig Überschuss wie möglich bildet.

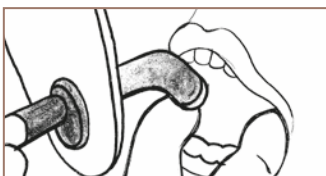

4. LICHTHÄRTEN

Dabei auf jedes Attachment zielen und die Aushärtezeit von 5-30 Sek. beachten (je nach Hersteller unterschiedlich).



5. ENTFERNEN

Die Folie und mögliche Überschüsse entfernen.